

Derma Tape

Bandagem Funcional El stica

Color Stamp

Derma Tape



Bandagem
Funcional
El stica

www.dermatape.com.br

Derma Tape

Esta fita possui um tecido especial, ondulado que se adapta as articulações do corpo humano e possui as seguintes características:

- Estica até 50% do seu tamanho
- Leve e super fino
- Estica em duas direções
- Fácil de cortar
- Livre de látex
- Permeável ao ar e umidade
- Cola acrílica (acrilato eudérmico)
- Aderência resistente a água

Contém 1 rolo com 5 m x 5 cm

Derma Tape

Bandagem Funcional El stica



Bandagem
Funcional
El stica

www.dermatape.com.br

Lote (LOT) Lot number

Validade Expirate date

Cuidado:

- Interromper o uso caso a pele fique irritada ou ferida (face a possíveis reações alérgicas).
- Não usar em ferida aberta ou em área de sangramento.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Não armazenar o produto sob luz solar direta.
- Em caso de lesão procure um profissional da saúde.

Instruções de uso:

- Limpe a lesão conforme os procedimentos normais.
- Selecione o material curativo adequado.
- Prepare e limpe a pele ao redor da lesão, removendo bem toda a umidade, loções e/ou cremas.
- Não estique a fita ao aplicar.
- Aplique a fita apenas sobre a pele seca e limpa.
- Remova a fita na direção do pelo.
- Não remova a fita bruscamente
- Para uma aplicação correta, consulte um especialista em bandagem elástica funcional.

Importado e distribuído no Brasil por: Controller Com. e Serv. Ltda.
Av. das Universidades, 325 - Pedra Branca - Palhoça - SC - CEP 88137315
Fone: 48 32482828 | 11 4063-0023 | 31 4063-9244
sas@controller-sc.com.br | www.controller-sc.com.br
Fabricante: Wuxi Wemede Healthcare Products Co. Ltd. - País de origem: China
Registro na ANVISA nº: 10410130038
Responsável Técnico: Arthur Aurélio Bernardes - CRF/SC 15829



Lote (LOT)

Lot number



Validade

Expirate date

Cuidado:

- Interromper o uso caso a pele fique irritada ou ferida (face a possíveis reações alérgicas).
- Não usar em ferida aberta ou em área de sangramento.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Não armazenar o produto sob luz solar direta.
- Em caso de lesão procure um profissional da saúde.

**Bar Code
Place
(each color)**

Instruções de uso:

- Limpe a lesão conforme os procedimentos normais.
- Selecione o material curativo adequado.
- Prepare e limpe a pele ao redor da lesão, removendo bem toda a umidade, loções e/ou cremes.
- Não estique a fita ao aplicar.
- Aplique a fita apenas sobre a pele seca e limpa.
- Remova a fita na direção do pelo.
- Não remova a fita bruscamente
- Para uma aplicação correta, consulte um especialista em bandagem elástica funcional.

Importado e distribuído no Brasil por: Controller Com. e Serv. Ltda.

Av. das Universidades, 325- Pedra Branca - Palhoça - SC - CEP 88137315

Fone: 48 32482828 | 11 4063-0023 | 31 4063-9244

sac@controller-sc.com.br | www.controller-sc.com.br

Fabricante: Wuxi Wemade Healthcare Products Co. Ltd. - País de origem: China

Registro na ANVISA nº: 10410130038

Responsável Técnico: Arthur Aurélio Bernardes - CRF/SC 15829

